



BSE診断用ELISAキット

ニッピブル® BSE検査キットⅡ

牛延髄における異常プリオン蛋白質の検出キット

動物用体外診断用医薬品

29動薬第1838号

ニッピブル® BSE検査キットⅡ (96回用)

NippiBL® BSE Test Kit II (for 96 samples)

定価: ¥630,000

動物用体外診断用医薬品

29動薬第1838号



Store at
2-8°C
禁・凍結
Do not freeze.

〔前処理用 試薬セット 構成〕

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| ① 試薬A (破砕用緩衝液) …… 100mL 1本 | ⑥ 標識抗体用希釈液 …… 12mL 1本 |
| ② 試薬B (プロテイナーゼK) …… 1mL 1本 | ⑦ 陽性コントロール …… 4ng(2mL) 1本 |
| ③ 試薬C (マイクロバルゼンプロテナーゼ) …… 1mL 1本 | ⑧ 陰性コントロール …… 3mL 1本 |
| ④ 抗体プレート …… 1枚 | ⑨ 基質液 …… 15mL 1本 |
| ⑤ 標識抗体溶液 …… 0.4mL 1本 | 付属品: プレートカバーシール …… 4枚 |

ニッピ ELISA試薬・前処理器材セット

Nippi ELISA Reagents and Pretreatment Equipment Set

定価: ¥195,000



Store at
1-30°C

〔構成〕

- | |
|---------------------------------|
| 反応停止液 …… 15mL |
| 濃縮洗浄液 …… 70mL |
| バイオマッシャー (破砕棒+フィルターチューブ) …… 93組 |
| 回収用チューブ (ジルコニア製ボール入り) …… 93個 |

BioMasher®
PAT.3853794

▶ コンパクトなパッケージになりました。

▶ 冷蔵のキットとELISA試薬・前処理器材を別のパッケージにすることにより冷蔵スペースの節約になります。

BSE診断用ELISAキット ニッピブル® BSE検査キットⅡ

牛延髄における異常プリオン蛋白質の検出キット

動物用体外診断用医薬品

29動薬第1838号


BioMasher®
PAT.3853794

破碎器具「バイオマッシャー®」を使用することにより、
破碎作業が安全、簡便に行えます。

ワンポット前処理法



1本のチューブで前処理が完結。
安全性を高め簡便化・迅速化を
実現しました。

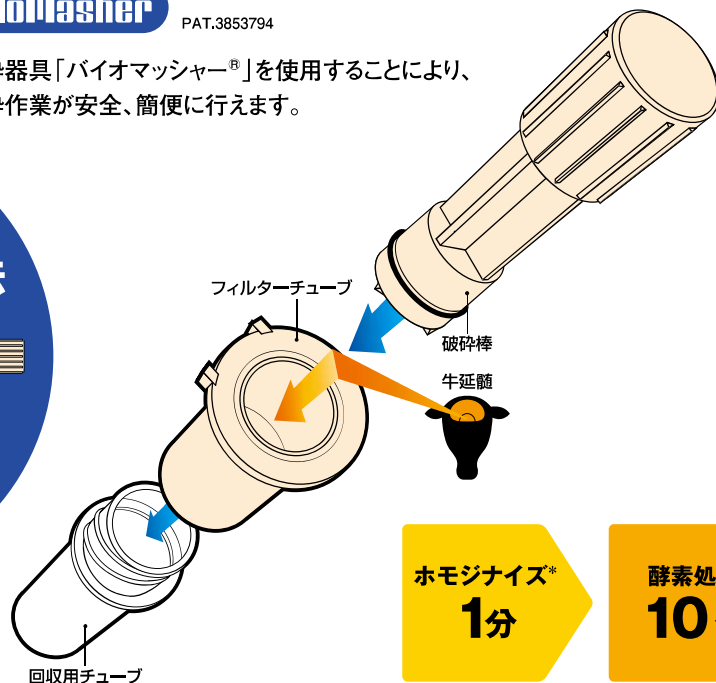

前処理時間

21分*

※チューブの開閉、移動、試薬添加の
時間は含みません。


ホモジナイズ*
1分

酵素処理
10分


加熱処理
10分

*遠心機 30秒+破碎機 30秒


ワンポット前処理法

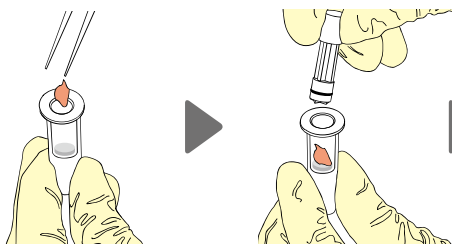


①バイオマッシャーに検査用組織を入れ、
破碎棒を挿入する。

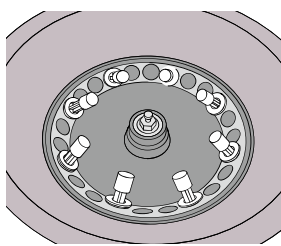


②15,000G、30秒間の遠心操作を行う。

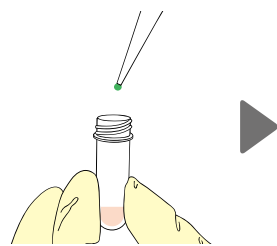


③酵素混合液を加える。

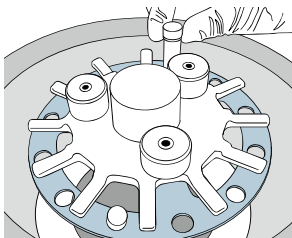

④30秒間の攪拌を行う。

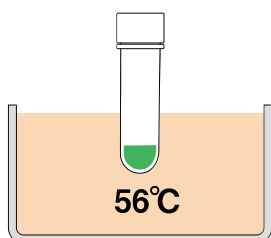

⑤56°C、10分間の酵素処理を行う。

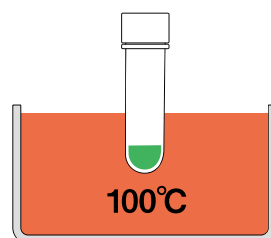

⑥100°C、10分間の熱処理を行う。

▶ 続いてELISA法による検出操作を行います。

製造元

nippi

株式会社 **ニッピ**

バイオ・ケミカル事業部

〒120-8601 東京都足立区千住緑町1-1-1 Tel.03-3888-5184
http://www.nippi-inc.co.jp E-mail.protein-info@nippi-inc.co.jp