

採材用シリンダー


nippi



本製品は、(株)ニッピが開発したBSE検査用採材器具です。ウシの延髄から、 $110 \pm 20\text{mg}$ の試料をより簡便に採取できます。



●使用方法：黒いピストンを下げ、シリンダーの先端に約3mmの隙間を作ります。(図1)
シリンダーの先端を用い、採材箇所を抜き切ります。天秤にて、 $110 \pm 20\text{mg}$ 秤量できていることを確認します。
回収用チューブに差し、ピストンを押し下げます。(図2)

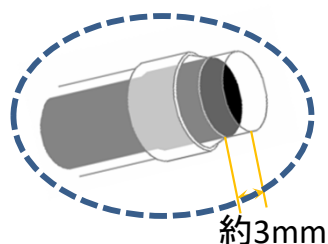

(図1)



(図2)

包装：100本/袋 材質：PP

製品番号	製品名	包装	定価
893503	採材用シリンダー	100本/袋	¥36,000

株式会社ニッピ° バイオ・ケミカル事業部

〒120-8601 東京都足立区千住緑町1-1-1 TEL:03-3888-5184 FAX:03-3888-5136

nippi